

COOL LINER 2.0 PROTESLINER

Protesliner av gel i olika tjocklekar med utvändigt lycraty för mindre friktion och slitage mot proteshylan. Är hudvänlig och innehåller mineraloljebaserad gel som är vitamin A, D och E berikad.

Modeller:

- UNIFORM = Tunnare geltjocklek på baksidan för bättre sittkomfort. Formbar vid 65°C, behåll temperaturen i en timme, låt sedan kallna.
- TAPERED (konisk) = Konisk formad liner med tjockare gellager i botten. Formbar vid 65°C, behåll temperaturen i en timme, låt sedan kallna.

Båda modellerna finns i vanlig version eller VSC (Vertical Stretch Control). VSC = Förstärkt liner för aktiva patienter.

Finns med eller utan pinnkoppling.




STORLEK / ARTIKELNUMMER

Tjocklek	Storlek	Form	COOL LINER		COOL LINER VSC		
			Utan pinnkoppling	Med pinnkoppling	VSC Utan pinnkoppling	VSC Med pinnkoppling	
3mm	3mm	Small	Uniform	DCL3SU	DCLP3SU	*DCLVSC3SU	*DCLVSCP3SU
	3mm	Medium	Tapered	DCL3MT	DCLP3MT	*DCLVSC3MT	*DCLVSCP3MT
	3mm	Medium	Uniform	DCL3MU	DCLP3MU	*DCLVSC3MU	*DCLVSCP3MU
	3mm	Medium +	Tapered	DCL3M+T	DCLP3M+T	*DCLVSC3M+T	*DCLVSCP3M+T
	3mm	Medium +	Uniform	DCL3M+U	DCLP3M+U	DCLVSC3M+U	DCLVSCP3M+U
	3mm	Large	Uniform	DCL3LU	DCLP3LU	DCLVSC3LU	DCLVSCP3LU
	3mm	Large +	Uniform	DCL3L+U	DCLP3L+U	DCLVSC3L+U	DCLVSCP3L+U
	3mm	X-Large	Uniform	DCL3XLU	DCLP3XLU	DCLVSC3XLU	DCLVSCP3XLU
6mm	6mm	Small	Uniform	DCL6SU	DCLP6SU	DCLVSC6SU	DCLVSCP6SU
	6mm	Medium	Tapered	DCL6MT	DCLP6MT	DCLVSC6MT	DCLVSCP6MT
	6mm	Medium	Uniform	DCL6MU	DCLP6MU	DCLVSC6MU	DCLVSCP6MU
	6mm	Medium +	Tapered	DCL6M+T	DCLP6M+T	DCLVSC6M+T	DCLVSCP6M+T
	6mm	Medium +	Uniform	DCL6M+U	DCLP6M+U	DCLVSC6M+U	DCLVSCP6M+U
	6mm	Large	Uniform	DCL6LU	DCLP6LU	DCLVSC6LU	DCLVSCP6LU
	6mm	Large +	Uniform	DCL6L+U	DCLP6L+U	DCLVSC6L+U	DCLVSCP6L+U
	6mm	X-Large	Uniform	DCL6XLU	DCLP6XLU	DCLVSC6XLU	DCLVSCP6XLU
9mm	9mm	Small	Uniform	DCL9SU	DCLP9SU	*DCLVSC9SU	*DCLVSCP9SU
	9mm	Medium	Tapered	DCL9MT	DCLP9MT	*DCLVSC9MT	*DCLVSCP9MT
	9mm	Medium	Uniform	DCL9MU	DCLP9MU	DCLVSC9MU	DCLVSCP9MU
	9mm	Medium +	Tapered	DCL9M+T	DCLP9M+T	*DCLVSC9M+T	*DCLVSCP9M+T
	9mm	Medium +	Uniform	DCL9M+U	DCLP9M+U	DCLVSC9M+U	DCLVSCP9M+U
	9mm	Large	Uniform	DCL9LU	DCLP9LU	DCLVSC9LU	DCLVSCP9LU
	9mm	Large +	Uniform	DCL9L+U	DCLP9L+U	*DCLVSC9L+U	*DCLVSCP9L+U
	9mm	X-Large	Uniform	DCL9XLU	DCLP9XLU	*DCLVSC9XLU	*DCLVSCP9XLU

* Special beställning, ej lagervara.

HUR MAN MÄTER OCH RÄKNAR UT RÄTT STORLEK

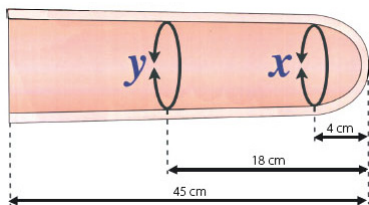

Steg 1. HITTA RÄTT MÅTT

Mät stumpens omkrets 4 cm från distala änden för att få fram ett x-värde.
Mät sedan stumpens omkrets 18 cm från distala änden för att få fram y-värdet.

UNIFORM STORLEKSTABELL

		Omkrets X (CM)																																			
		16,5	18	19	21	22	23	24	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36,5	38	39,5	41	42	43	44,5	46	47	48	49,5	51	52	53	55					
21																																					
22																																					
23																																					
24																																					
25,5																																					
26,5																																					
28																																					
29,5																																					
30,5																																					
31,5																																					
33																																					
34																																					
35																																					
36,5																																					
38																																					
39,5																																					
41																																					
42																																					
43																																					
44,5																																					
46																																					
47																																					
48																																					
49,5																																					
51																																					
52																																					
53																																					
54,5																																					
56																																					
57																																					
58,5																																					
60																																					
61																																					
62																																					
63,5																																					
65																																					
66																																					

Steg 2. LÄS AV STORLEKSTABELL

Använd x-värdet och y-värdet du fick fram i steg 1 för att med hjälp av Uniform storlekstabell för få fram vilken storlek och form du behöver.

Om stumpen är konisk så att du inte finner någon lämplig storlek i Uniform storlekstabell se då i Tapered (konisk) storlekstabell.

TAPERED (KONISK) STORLEKSTABELL

		Omkrets X (CM)										
		16,5	18	19	21	22	23	24	25,5	26,5	28	29,5
21												
22												
23												
24												
25,5												
26,5												
28												
29,5												
30,5												
31,5												
33												
34												
35												
36,5												
38												
39,5												
41												
42												
43												
44,5												
46												



DISTRIBUTÖR:
ORTEO AB, BOX 2014,
S-135 02 TYRESÖ, SWEDEN
T: +46 8 203090, F: +46 8 7423090
E: INFO@ORTEO.SE, W: WWW.ORTEO.SE

PRODUCENT:
DAW INDUSTRIES INC SAN DIEGO, CA

DAWSKIN

Kosmetiskt överdrag

DAWSKIN MEGASTRETCH: Lätt att applicera och vattentät. Kan användas flera gånger/är avtagbar om DAWSKIN speciallim används (beställes separat). Fotalternativ: utan tår, tår eller delad tå.


DAWSKIN MEGASTRETCH EZ-access: Resår i överkant gör att produkten är avtagbar och ej behöver limmas. Lätt att applicera och vattentät. Fotalternativ: utan tår, tår eller delad tå.



SHOWER SEAL

Kosmetiskt överdrag med anti-halk skydd under fotdelen.

SHOWER SEALset har DAWSKIN MEGASTRETCHs egenskaper samt ett anti-halk skydd under fotdelen för bättre fäste exempelvis vid duschsituation när golvet är vått. Shower seal består även av en tunn knämanschett av gel som spänns åt över och under hylskanten för att täta mot vatten.

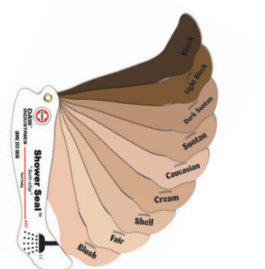

COOL SLEEVE

Knämanschett av gel

COOL SLEEVE (tidigare G-SLEEVE) är en knämanschett för underbensproteser av gel med utvändigt lycratyg. Mjuk och komfortabel att sitta med. Den är helt tät vilket gör den lämplig även för vakuumphylsor.



DAWSKIN OCH SHOWER SEAL

STORLEKSTABELL

Mått	XXS	XS	S	M	L
Mått lår	35-41 cm	43-48 cm	43-48 cm	48-58 cm	52-68 cm
Mått vad	23-26 cm	29-33 cm	32-36 cm	35-41 cm	41-47 cm
Mått fotled	13-18 cm	18-21 cm	21-24 cm	22-26 cm	24-29 cm
Fotlängd	14-19 cm	20-25 cm	21-24 cm	25-27 cm	28-30 cm
Längd Dawskin	BK 50 cm AK 68 cm	BK 50 cm AK 73 cm	BK 53 cm AK 73 cm	BK 58 cm AK 78 cm	BK 60 cm AK 85 cm

BK= Below knee, nedanför knä
AK= Above knee, ovanför knä

BESKRIVNING AV MODELLER

Modell	Tåutförande	BK	AK	2-part AK
DAWSKIN MEGASTRETCH	Utan tår	XXS-L	XXS-L	XXS-L
DAWSKIN MEGASTRETCH	Tår	S/M/L	S/M/L	S/M/L
DAWSKIN MEGASTRETCH	Delad tår	S/M/L	S/M/L	S/M/L
DAWSKIN MEGASTRETCH EZ-access	Utan tår	S/M/L		
DAWSKIN MEGASTRETCH EZ-access	Tår	S/M/L		
DAWSKIN MEGASTRETCH EZ-access	Delad tår	S/M/L		
SHOWER SEAL	Utan tår	XXS-L		
SHOWER SEAL	Tår	XS/S/M/L		
SHOWER SEAL	Delad tår	XS/S/M/L		

SKAPA ARTIKELBENÄMNING

Modell	Tåutförande	Höjd	Storlek	Färg	Sida	
DAWSKIN MEGASTRETCH:	DSKM	Utan tår: Ingen bokstav	Ovanför knä: AK	XXS: A	SHELL	Vänster: L
DAWSKIN MEGASTRETCH EZ access:	DSKE	Tår: T	Nedanför knä: BK	XS: P	Andra färger:	Höger: R
SHOWER SEAL:	SSS	Delad tår: S		S: S	BLUSH DKSUN	
				M: M	FAIR LTBLK	
				L: L	CREAM CAUC	
					BLACK GRHBLK	
					SUN	

Lagervaror: DAWSKIN MEGASTRETCH EZ access (DSKE), tår (T), nedanför knä (BK), S/M/L, SHELL, L/R.

TILLBEHÖR

DSKSG	DAWSKIN Klister
DSKCFHAIR	DAWSKIN Hair Addition
DSKSGREL	DAWSKIN Glue Release Formula
DSKDT...	DAWTRIM

COOL SLEEVE

ARTIKELNUMMER / STORLEK

Produkt namn	Storlek	Antal	Artikel nummer	Bredd upptill liggande plant	Bredd nertill liggande plant
Cool Sleeve	X-Small	5-pack	DGSXS5	12 cm	10 cm
Cool Sleeve	Small	5-pack	DGSS5	14 cm	12 cm
Cool Sleeve	Medium	5-pack	DGSM5	16 cm	14 cm
Cool Sleeve	Large	5-pack	DGSL5	19 cm	17 cm
Cool Sleeve	X-Large	5-pack	DGSXL5	22 cm	20 cm
Cool Sleeve	X-Small		DGSXS1	12 cm	10 cm
Cool Sleeve	Small		DGSS1	14 cm	12 cm
Cool Sleeve	Medium		DGSM1	16 cm	14 cm
Cool Sleeve	Large		DGSL1	19 cm	17 cm
Cool Sleeve	X-Large		DGSXL1	22 cm	20 cm



DISTRIBUTÖR:
ORTEO AB, BOX 2014,
S-135 02 TYRESÖ, SWEDEN
T: +46 8 203090, F: +46 8 7423090
E: INFO@ORTEO.SE, W: WWW.ORTEO.SE

PRODUCENT:
DAW INDUSTRIES INC SAN DIEGO, CA